

اصول نگهداری از وسایل و تجهیزات

واحد بهداشت دهان و دندان از جمله واحدهایی است که دارای تجهیزات و مواد گران قیمت می باشد ، دقت در مراقبت و نگهداری از این وسایل از جمله وظایف افرادی است که در این واحدها مشغول به کار می باشند.

نحوه مراقبت از یونیت :

ü بعد از اتمام کار یونیت را در موقعیت Zero position قرار داده ، چراغ و کلید قطع و وصل را در حالت خاموش قرار دهید.

ü شیر فلکه آب و هوای یونیت را بعد از اتمام کار ببندید .

ü جهت ازدیاد طول عمر کمپرسور ، از استاندارد بودن مقدار روغن از طریق دریچه شیشه ای روی مخزن روغن اطمینان حاصل کنید .

ü هنگامی که با یونیت کار نمی کنید ، چراغ آنرا خاموش کنید .

ü پس از اتمام کار با فشار دادن کلید برگشت ساکشن رسوبات داخل شلنگ را تخلیه کنید

ü فیلتر داخل کراشوار را تمیز نمایید .

ü بهتر است محورهای صندلی دندانپزشکی هر چند وقت یکبار گریسکاری شود .

ü در صورتی که آب منطقه دارای املاح زیاد است در مسیر آب ورودی دستگاه سخت گیر قرار دهید .

نحوه مراقبت از اتوکلاو :

ü اتوکلاو در یک مکان ثابت قرار داد شود .

ü از قراردادن وسایل اضافی در روی اتوکلاو خودداری کنید .

ü قبل از قراردادن وسایل در داخل اتوکلاو ، آنها را کاملاً خشک کنید .

ü سرویسهای دوره ای نگهداری را طبق دستورالعمل سازنده انجام دهید

نحوه مراقبت از آمالگاماتور

ü آمالگاماتور را در جای ثابت قرار دهید .

ü مقدار جیوه آمالگاماتور همیشه ثابت است و فقط تنظیم پودر آن امکان پذیر است ، برای تنظیم مقدار پودر و مایع آمالگام ، در بغل آمالگاماتور یک پیچ فلش دار قرار گرفته که دارای علامت مثبت و منفی می باشد ، اگر پیچ را به طرف مثبت بچرخانید پودر بیشتر می شود و اگر به طرف منفی بچرخانید مقدار پودر کمتر و در نتیجه جیوه آمالگام بیشتر می شود.

ü درجه تنظیم پودر آمالگاماتور را همیشه با وسیله ای تنظیم نمایید که به دستگاه آسیب نرساند و از بکار بردن تیز و برنده خودداری کنید.

ü تا قبل از توقف کامل مخلوط کننده آمالگام ، به آن دست نزده و آنرا با فشار دست متوقف نکنید

ü جهت حفاظت از اشعه آفتاب از قراردادن آمالگاماتور پشت پنجره خودداری کنید

نحوه مراقبت از وسایل جراحی ترمیمی

ü بعد از هربار استریلیزاسیون ، وسایل را در داخل کشوی روتار قرار دهید .

ü زیر و روی وسایل را با یک تکه پارچه سبز تمیز بپوشانید .

ü بعد از هربار استفاده از وسایل آنها را کاملاً شسته و در محلولهای ضد عفونی کننده قرار دهید .

ü در پایان کار کلیه وسایل را آبکشی کرده ، خشک کنید و در فور قرار دهید .

ü قبل از قرار دادن وسایل در داخل فور ، مطمئن شوید که آمالگام سطح آنها کاملاً پاک شده است .

ü قلمهای جرم گیری را بعد از هربار استفاده کاملاً با آب شسته و در محلولهای ضد عفونی استریل نمایید و یابینکه طبق دستور کارخانه در اتوکلاو استریل نمایید .

نحوه مراقبت از فرزها :

ü فرزها را بطور مرتب در جا فرزی قرار دهید .

- ü از استفاده فرزهای دارای خوردگی و فرسوده خودداری نمایید .
- ü فرزها را توسط آچار مخصوص توربین در محل قرار داده و خارج نمایید .
- ü بعد از هربار استفاده فرزها را در محلولهای ضد عفونی قرار دهید
- ü در پایان کار فرزها را شسته ، کاملاً خشک کرده در فور قرار دهید.

نحوه مراقبت از سرتوربین

- ü پس از اتمام کار سرتوربین و آنگل با اسپری روغنکاری شود و سپس تا نوبت کاری بعد به طور عمودی در محل تعیین شده نگهداری شود .
- ü برای جلوگیری از استهلاک بیش از حد توربین و آنگل ، سعی شود از فرزهای سالم و حتی المقدور نو استفاده شود .
- ü از وارد شدن ضربه به اینسترومنتها به هر نحو ممکن جلوگیری بعمل آورید . در صورتی که هد اینسترومنت ضربه دید با آن کار نکنید و توربین را جهت تعمیر به مرکز تعمیرات ارسال نمایید .
- ü برای داشتن هوای خشک جهت استفاده اینسترومنتها باید هرچند روز یکبار شیر تخلیه کمپرسور را باز ، تاآب حاصل از فشرده شدن بخار موجود در هوای کمپرسور تخلیه گردد .
- ü تنظیم فشار هوای مورد نیاز یونیت باید توسط تکنسین و بوسیله مانومتر مخصوص انجام پذیرد .
- ü توسط محلول میکرو - ۱۰ و پنبه یا گاز ، اینسترومنتها را ضد عفونی نمایید .
- ü جهت استریل نمودن اینسترومنتها ، پس از تمیز کردن و گذاشتن آنها در پاکت مخصوص آنها را در اتوکلاو (بمدت ۳۰ دقیقه) قرار دهید .
- ü بلبرینگ های توربین برای مدت یک ساعت قابلیت نگهداری روغن را در داخل خود دارند ، بنابراین در موقع کار بهتراست هر یک ساعت یک بار توربین را روغنکاری نمایید .
- ü پس از اتمام کار فرز را از سرتوربین و آنگل خارج نمایید .

ü در صورتی که توربین قابل اتوکلاو کردن باشد (روی آن نوشته یا علامت اتوکلاو حک شده است) آن را با اتوکلاو استریل کنید .

نحوه مراقبت از کاویترون :

ü به منظور تنظیم قدرت کاویترون هنگام کار ولوم آن را تغییر ندهید ، ابتدا پا را از روی پدال برداشته و بعداً این کار را انجام دهید.

ü برای هربار که قلم را داخل هندپس قرار می دهید ، هواگیری الزامی است